

1. Ob der Apparat auch wirklich eingeschaltet und der Lautstärkeregler eingestellt ist.
2. Ob der Kanal der Ohrmulde sauber ist.
3. Erneuern Sie die Batterie und achten Sie darauf, dass sie richtig in den Apparat eingesetzt wird.
4. Sehen Sie nach, ob das Kabel richtigen Kontakt hat, und nicht unterbricht. Wenn die Töne zeitweise aussetzen, so weist das auf einen Bruch in der Schnur hin.
5. Der Apparat darf nie geöffnet oder durch Nichtfachleute repariert werden.

#### KUNDENDIENST

Prompte Bedienung, Ersatzkabel und Batterien erhalten Sie bei

653-2-61

## Bedienungsanleitung für Ihr neues

micro·technic

**SONOR 66**

SONOR XC  
COMPRESSION

- bitte aufmerksam  
durchlesen →

Wenn Sie die in diesem Büchlein enthaltenen Weisungen genau befolgen, so werden Sie aus Ihrem Hörgerät den äussersten Nutzen ziehen und an ihm auch die grösste Freude haben.

Falls Sie schon seit mehreren Jahren schwerhörig sind, und bis jetzt noch kein Hörgerät getragen haben, so empfiehlt es sich, langsam vorzugehen, um die inzwischen vergessenen Töne und Laute wieder unterscheiden zu lernen. Konzentrieren Sie sich vor allem auf direkte Konversation in ruhiger Umgebung. Beobachten Sie den Sprecher und bitten Sie um Wiederholung des Gesagten, falls es Ihnen unverständlich ist. Erst wenn Sie mit Ihrem Hörgerät vertraut sind, sollten Sie sich an Gruppenbesprechungen beteiligen oder das Gerät auf der Strasse benutzen.

Es dauert oft einige Wochen, bis der Schwerhörige sich richtig an sein Hörgerät gewöhnt hat. Dann aber kann er das Hörgerät als Bestandteil seiner Person betrachten.

Sollten Sie früher schon ein Hörgerät getragen haben, so werden Sie sich ohne Schwierigkeiten auf das micro-technic SONOR 66 umstellen können. Das kleine Format, das leichte Gewicht, die Ein-

fachheit des Batteriewechsels, wie auch andere Vorteile des Gerätes werden Ihnen grosse Freude bereiten.

#### BEDIENUNG


1. Beide Stecker des Kabels sind polarisiert, d.h. die Stifte sind verschieden dick. Das eine Kabelende wird in die Steckerbuchsen, die sich an der Seite des Gerätes befinden, eingesteckt. Das andere Ende an den Hörer angeschlossen. Beide Stecker sollen richtig fest sitzen.

Um Ihnen einwandfreies Hören zu garantieren, muss eine sogenannte individuelle Ohrmulde verwendet werden, welche genau nach den Massen Ihres Ohres nach einem Ohrabdruck angefertigt wird. Die Massohrmulde hat den Vorteil, dass sie richtig sitzt, ohne zu drücken und den Schall noch zusätzlich auf den Knochen überträgt.

2. Der Hörer wird wie ein Druckknopf an der Ohrmulde befestigt.

3. Die Batterie wird in Pfeilrichtung eingesetzt, Pluszeichen der Batterie auf Pluszeichen im Apparat.

4. Die Dame trägt das micro-technic SONOR 66 unauffällig unter dem Kleid.

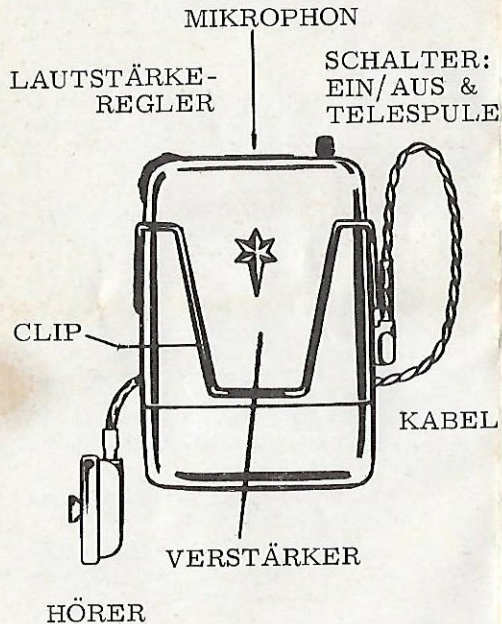

Der Herr trägt das Gerät am zweckmässigsten in einem kleinen Waschlender-Säckchen unter dem Oberhemd, oder in der Brusttasche des Jackets.

Achten Sie doch darauf, dass das Hörgerät nicht lose sitzt, um Reibegeräusche zu vermeiden.

#### EIN/AUSSCHALTER UND TELEFONSPULE

Wenn die Ohrmulde richtig im Ohr sitzt, wird das Hörgerät eingeschaltet, indem man den Hebel nach unten schiebt und in die Mittelstellung bringt. Beim Telefonieren und beim Hören in Räumen mit einer sogenannten Induktionsschleife wird der Hebel ganz nach unten gestellt und damit die eingebaute Telefonspule eingeschaltet.

Bei Nichtgebrauch des Gerätes ist darauf zu achten, dass es ausgeschaltet ist. Das heisst, dass der kleine Schalthebel sich in der senkrechten Stellung befindet. Auf diese Weise werden Hörgerät und Batterie geschont.

#### LAUTSTÄRKEREGLER

Sie erhalten die gewünschte Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers, welcher mit den Ziffern 1 bis 9 markiert

ist. Man wähle eine Lautstärke, die dem Ohr ein müheloses Verstehen ermöglicht. Vergessen Sie nicht, dass das Gerät nicht nur Sprache und Musik verstärkt, die Sie zu hören wünschen, sondern alle auftretenden Töne und Geräusche.

#### TONREGLER

Das micro-technic SONOR 66 hat einen individuell einstellbaren Tonregler auf der Rückseite des Gehäuses, direkt über dem Batteriefach.

Dieser Regler wird bei der Anpassung durch Ihren Hörgeräte-Akustiker speziell für Ihren Fall eingestellt und sollte danach nicht mehr verstellt werden. Merken Sie sich bitte trotzdem die Stellung des Reglers, damit Sie, im Fall einer irrtümlichen Verstellung, die alte Position selbst wieder einstellen können.

#### PFLEGE DES APPARATES

Vergessen Sie nicht, dass Ihr Hörgerät ein Präzisionsinstrument ist. Lassen Sie weder das Gerät, noch den Hörer fallen. Setzen Sie es auch weder grosser Feuchtigkeit noch hohen Temperaturen aus. Bei Kurzwellen, oder anderen elektrischen Heilbehandlungen ist darauf zu achten, dass der Apparat vor Betre-

ten des Behandlungsraumes abgelegt wird.

Die Ohrmulde muss von Zeit zu Zeit vom Hörer entfernt und in warmem Seifenwasser gereinigt werden. Benzin oder andere Reinigungsmittel beschädigen die Ohrmulde. Es ist stets darauf zu achten, dass der Hörkanal in der Ohrmulde nicht durch Absonderungen verstopft ist.

Der Magnethörer darf nie mit Wasser in Berührung kommen. Er muss vor dem Reinigen der Ohrmulde abgenommen werden.

Bitte gehen Sie mit dem Kabel sorgfältig um, es soll nicht geknickt oder geknotet werden.

Kaufen Sie Ersatzbatterien oder Kabel nur bei Ihrem Hörmittelhändler, weil Sie dort die Garantie haben, stets frische und richtige Waren zu erhalten. Halten Sie immer Kabel und Batterien in Reserve.

#### WIE SIE KLEINE DEFEKTE SELBST BEHEBEN KÖNNEN

Sollte Ihr Hörgerät nicht funktionieren, oder zeitweise aussetzen, prüfen Sie folgendes: