

ReSound Micro Mic



Produktbeschreibung

Das ReSound Micro Mic überträgt Sprache direkt in die Hörsysteme Ihrer Kunden und dies mit einer Reichweite von bis zu 25 Metern (bei freier Sichtlinie).

Es bietet:

- Exklusives, unauffälliges Design, mit geringem Gewicht
- Eins-zu-Eins Kommunikation bei Anbringung an der Kleidung oder mit Umhängeband
- Plug-and-Play Funktionalität

Die beste Wahl für eine Eins-zu-Eins Kommunikation sind die ReSound Wireless Hörsystemen zusammen mit dem Micro Mic, da diese Kombination einfach zu bedienen ist und außergewöhnliche Vorteile gegenüber der Nutzung von herkömmlichen Hörsystemen bringt. Durch ein optimiertes Sprache-zu-Lärm Verhältnis, verbessert es das Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen, in denen die Entfernung, Hintergrundgeräusche oder die Akustik eine Rolle spielen.

Es überträgt die Stimme eines Sprechers direkt in die Hörsysteme, ohne zusätzliche Geräte - ohne Kabel oder lästige Trageschlaufen.

Da der Zuhörer während des Gesprächs nicht direkt in die Richtung des Sprechers schauen muss, ist er in der Lage, gleichzeitig auch weitere Aufgaben zu erledigen, etwas das für Normalhörende selbstverständlich ist.

Ferner erweitert das Micro Mic den Hörbereich und darüber hinaus die Reichweite der Hörsysteme in vielen Situationen, in denen ein besseres Hören gewünscht ist, wie z.B. :

- In der Kirche
- Im Auto
- Im Restaurant

Die eingebaute Lautstärkeregelung ermöglicht eine einfache Einstellung des übertragenen Sprachpegels. Sollte das Micro Mic versehentlich aus einer Höhe von mehr als 75 cm auf den Boden fallen, wird das übertragene Signal durch den Fallsensor stummgeschaltet, um unangenehme Geräusche zu vermeiden.

Einfache Paarung

- Drücken Sie die Paarungstaste am Micro Mic, öffnen und schließen Sie die Batteriefächer Ihrer Hörsysteme. Das Micro Mic bleibt 20 Sekunden im Paarungsmodus.
- Die Paarung kann auch in der ReSound Aventa Anpassungssoftware vorgenommen werden.
- Es ist nur ein Paarungsvorgang notwendig - einmal gepaart, bleibt das Micro Mic mit den Hörsystemen verbunden.

Benutzerfreundlich

- Schalten Sie das Micro Mic ein und aktivieren Sie den Streaming Modus in den Hörsystemen
- Einfach Aufzuladen (Ladegerät inklusive)
- Betriebszeit: typisch 10 Stunden
- Kann an der Bekleidung befestigt oder an einem Umhängeband um den Hals getragen werden
- Lautstärkeregelung für eine einfache Einstellung (inkl. Sperre der Lautstärkeregelung)
- Fallsensoren - schaltet das übertragene Signal vorübergehend ab, falls das Micro Mic aus einer Höhe von mehr als 75 cm auf den Boden fällt

2,4 GHz Wireless-Technologie

- Intelligenter, robuster und zuverlässiger Standard mit starken, klaren und stabilen Signalen
- Durch die kurze Verzögerung von nur 20ms gibt es keine Probleme mit einer Asynchronität von Bild und Ton

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup,
Dänemark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

DEUTSCHLAND
GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
D-48157 Münster
Tel.: +49 251 - 20 39 6-0
Fax: +49 251 - 20 39 6-250
info@gnresound.de
www.resound.com
www.resoundpro.com

ÖSTERREICH
GN ReSound Hörtechnologie GmbH
Wimbergasse 14-16
A-1070 Wien
Tel.: +43 1 524 54 00-0
Fax: +43 1 524 54 00-444
info@gnresound.at
www.resound.com
www.resoundpro.com

SCHWEIZ
GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 44 722 91 11
Fax: +41 44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.resound.com
www.resoundpro.com

ReSound

rediscover hearing

Beschreibung

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 Power-Taste | 6 Lautstärke - | 11 Befestigungsclip |
| 2 Mikrofonöffnung | 7 Stummschalt-Taste | 12 Netzadapter |
| 3 Mikrofonöffnung | 8 Lautstärke + | 13 Ladekabel |
| 4 LED-Anzeige | 9 Stummschaltanzeige (LED) | 14 Etui |
| 5 Micro-USB-Anschluss zum Aufladen | 10 Paarungstaste | 15 Umhängeband |



Technische Daten

Abmessungen	53 x 25.5 x 20.3 mm
Gewicht	17 Gramm
Ladegerät	Integrierter Akku
Lade-Anschluss	Micro-USB
Betriebszeit (vollständig geladen)	Typisch 10 Stunden
Ladezeit	Max. 3 Stunden, abhängig vom Batteriestatus
Wireless-Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	Bis zu 25 Meter (bei freier Sichtlinie)
Wireless-Verbindungen	Mehrere Hörsysteme pro ReSound Micro Mic möglich. Bis zu 3 ReSound Systemkomponenten bei binaural angepassten Hörsystemen möglich
Übertragungsverzögerung an die Hörsysteme	20 ms
Audioschnittstelle	Zwei Mikrofonöffnungen
Audio Frequenzbereich	100-8000 Hz \pm 3dB
Akustische Empfindlichkeit des Mikrofons	Analog zu Hörsystemen \pm 3dB
Clip Modus	Geräuschunterdrückender Mikrofonmodus mit fester Direktionalität zum Mund des Sprechers
Lautstärkebegrenzung	Die Lautstärke eingehender Signale ist auf max. 85dB SPL begrenzt, um unangenehme und zu laute Signale zu vermeiden
ESD-Toleranz	Nach DIN IEC 61000-4-2 Electro-static discharge immunity test standard. 6kV Contact discharge method / 8kV Air discharge method
Konformität der Wireless-Hörsystemschnittstelle	EN300 328, ETSI EN 300 440-1 FCC CFR 47 Part 15, Subpart C, §15.247
Betriebs- und Ladetemperatur	0 bis 45 ° Celsius Auch in Umgebungen unter 0 ° Celsius möglich, dies reduziert die Batterielebensdauer
Lagertemperatur:	-20 bis 45 °Celsius